




Guide de démarrage rapide



1 Placez le compresseur sur une surface plane

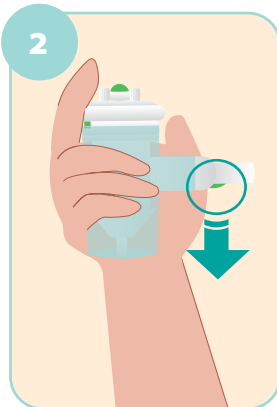

2 Assurez-vous que le clapet de l'embout buccal est orienté vers le bas



3 Dévissez la partie supérieure



4 Retirez la partie supérieure




5 Placez le médicament dans le porte-nébuliseur



6 Remettez la partie supérieure en place




7 Serrez doucement à la main

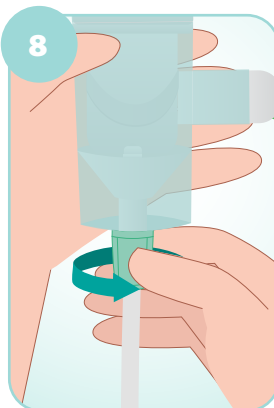

8 Fixez la tubulure à la partie inférieure du nébuliseur



9 Placez le nébuliseur dans le porte-nébuliseur et fixez la tubulure à l'entrée d'air du compresseur

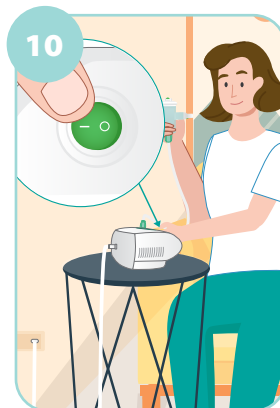

10 Branchez le compresseur et mettez-le en marche




11 Placez l'embout buccal dans la bouche



12 Inspirez lentement et profondément



13 Expirez normalement

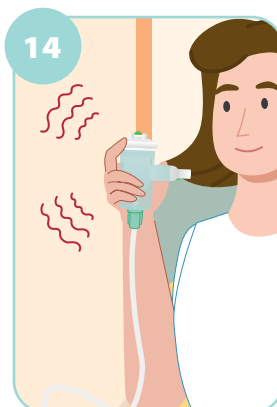

14 Continuez jusqu'à ce que vous entendiez un son de toussotement



15 Éteignez le compresseur et débranchez-le. Déconnectez le nébuliseur du compresseur

AeroEclipse^{MC} XL

BAN^{MC} Nébuliseur




Méthodes de nettoyage



Faites tremper
à l'eau chaude savonneuse.



Rincez à
l'eau propre.

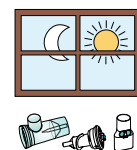

Séchez à l'air
complètement.




OU
Va au lave-vaisselle
dans le panier supérieur.

À l'exception de la tubulure

Méthodes de désinfection



1 **Faites bouillir**
pendant 5 à 15 minutes.

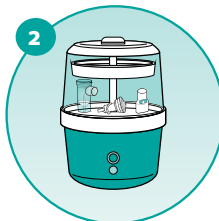

2 **Stérilisateur à
vapeur
électronique**
Voir le mode d'emploi.



3 **Sac à vapeur
au four à
micro-ondes**
Voir le mode d'emploi.

4 **Alcool isopropylique
à 70 %**

Faites tremper pendant 5 minutes.
Rincez abondamment à l'eau stérile.

5 **Solution d'eau de
Javel diluée 1:50**

Faites tremper pendant 3 minutes.
Rincez abondamment à l'eau stérile.

6 **Milton[®], Dodie[®],
Control III[®], Cidex[®]**
Voir le mode d'emploi.

7 **Solution de vinaigre
diluée 1:3**

Faites tremper pendant 1 heure. Rincez
abondamment à l'eau stérile.

À l'exception de la tubulure

Compresseurs

OMBRA^{MD}



Méthode de nettoyage

Débranchez le compresseur de la prise électrique.

Essuyez l'étui, changez-le et
manipulez-le avec un chiffon humide.



Méthodes de désinfection

Débranchez le compresseur de la prise électrique.



1 **Essuyez** l'étui, changez-le et manipulez-le avec un chiffon trempé dans :

- Alcool isopropylique à 70 %
- Solution d'eau de Javel diluée 1:50
- Solution SoluPrep[®] 3M[®]

2 **Essuyez** l'étui, changez-le et manipulez-le avec :

- Lingettes germicides jetables Super Sani-Cloth[®] PDI[†]
- Voir le mode d'emploi.

Pour connaître les indications d'utilisation et les instructions d'utilisation plus détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi qui accompagne votre nébuliseur **AeroEclipse^{MD} XL BAN^{MC}** et votre compresseur de table **Ombra^{MD}** (accessible à l'adresse www.trudellmed.com/ca/fr-CA)

Fabriqué par:



**TRUDELL MEDICAL
INTERNATIONAL**

+1-866-510-0004

info@trudellmed.com trudellmed.com



Pour un rendement optimal,
remplacez le produit après 6 mois

RENSEIGNEZ-VOUS

